



במיוחד עכשיו: D-Light Pro
מכשיר הקשיה באור הניתן לעיקור!
(עמ' 2)

מבצעים חמים

יוני - ספטמבר 2020

י.א.י.

D-Light® Pro




טווח רחב של אורכי גל

להקשיט כל חומר מרוכב ולחימום גלאס יונמרים



יעיל במיוחד

עצמה גבוהה + נמוכה

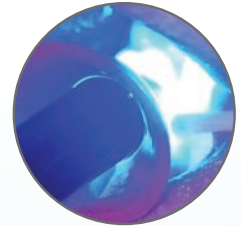

תכנית אבחנה

לאבחון עששת, זיהוי פעילות חיידקית, זיהוי שחזורים ישנים ועודפי צמנט, איתור דלף שולי, אבחון סדקים ועוד



קטן ואלגנטי

קל משקל, נוח לאחיזה ושימוש, עם 2 סוללות נטענות, עריסה עם בדיקת עוצמת ההארה



ומקבלים מוליך אור מחוזק נוסף
בשווי 450 ₪ **מתנה!**

ב-2,990 ₪

רוכשים מכשיר
D-light Pro

הלייט-קור שלך ניתן לעיקור?

D-Light Pro מתאים לעיקור באוטוקלב, לאחר הוצאת הליבה האלקטרונית, לשמירה על רמת חיטוי מרבית!



לצד היתרונות, קיימות מגבלות המחייבות לשקול את השימוש בצמנט גלאס יונמר בהתאם למקרה. הוא לא מתאים להשחזה לא רטנטיבית או במקרים בהם נדרשת הדבקה חזקה במיוחד, השינוי הנפחי של הצמנט לא מאפשר הדבקה של שחזורי חרסינה פלדספטי טהורה, ומבחר הגוונים מצומצם ואינו מאפשר התאמה אסתטית עילאית הנדרשת במקרים כמו כתרים אסתטיים קדמיים או ציפויי חרסינה. יחד עם זאת, הדורות האחרונים של צמנטים אלו ניחנים בחוזק קישור גבוה יותר, לצד שיפור בנוחות השימוש, כגון Fuji CEM Evolve, המסופק במזרק ייעודי (ללא צורך בקליקר) ומאפשר הקשיה מהירה באור להסרת עודפים (tack curing).

דבקים על בסיס רזין: דבקים אדהזיביים, המתחברים לחומר השן בקישור מיקרו-מכאני. כוללים דבקים עם קישור עצמי (כגון G-CEM LinkAce) שאינם דורשים צריבה וקישור, לצד דבקים המחייבים שימוש בצריבה וקישור ומאפשרים חוזק קישור גבוה יותר, כגון G-CEM Veneer IX G-CEM LinkForce. יתרונותיהם העיקריים הם (א) חוזק קישור גבוה, הן לשן והן לחומרי השחזור החדשניים. כך מתאפשר קישור גם ברטציה שאינה מיטבית (למשל - בציפויי חרסינה); (ב) מבחר גוונים ועמידות צבע גבוהה, המבטיחים רמת אסתטיקה גבוהה, החשובה לשחזורים מודבקים אסתטיים. בחלק מהחומרים משוחות בדיקה מאפשרות בדיקה מקדימה של גוון הצמנט; (ג) הדורות האחרונים, כמו G-CEM LinkAce-I G-CEM LinkForce, הם בעלי עובי שכבה דק במיוחד ($3-4\mu$), לעומת 10μ ומעלה בדורות קודמים) למניעת שטיפה או צביעה של הצמנט.

המגבלות של דבקים על בסיס רזין הן הצורך בבידוד קפדני של השן מכני רטיבות, הצורך בפרוצדורה מורכבת יותר (צריבה, קישור) להשגת חוזק קישור גבוה, היעדר הפרשת פלואוריד, ורגישות פוטנציאלית בהדבקה על שיניים ויטאליות.

לסיכום: כדי לאפשר התמודדות מוצלחת עם האתגרים השונים של כלל המקרים הקליניים, רופא השיניים נדרש ל-2-3 סוגי דבקים שונים, שיתנו לו מענה לדרישות השונות.

רופא השיניים המעודכן, המקפיד על מעקב אחר התפתחות הטכנולוגיה, משתמש בחומרי שחזור חדשניים ומחפש אחר האדהזה המיטבית המתאימה לכל מקרה - מוצא עצמו ניצב בפני אתגר לא פשוט דווקא בהתמודדות עם נקודת התורפה העיקרית בשיקום מודבק - תהליך ההדבקה עצמו - בשל ריבוי ההיבטים המשפיעים על ההחלטה על הצמנט המתאים.

מלבד היבטים שהתקיימו מאז ומעולם, שכללו **משתנים הקשורים למתרכא ולסוג ההכנה** (כגון מידת הרטנציה של ההשחזה, רמת תחלואת העששת, דרישות אסתטיות וכיו"ב), בשנים האחרונות רופא השיניים נדרש לכלול בשיקוליו היבטים נוספים. ביניהם כוללים הן **משתנים הקשורים לחומרי שחזור חדישים**, כגון זירקוניה, ליתיום דיסיליקט או חרסינה היברידית, והן **משתנים המושפעים מההתפתחויות הטכנולוגיות בדבקים עצמם** ונגזרים ממאפייניהם: גלאס יונמר, גלאס יונמר משופר-רזין, רזין בקישור עצמי ודבקי רזין מורכבים, בהקשיה עצמית, הקשיה באור או הקשיה כפולה.

לכאורה, ניתן בקלות להכין רשימת דרישות לחומר ההדבקה הדנטלי האידיאלי: חוזק קישור גבוה הן לחומר השן והן לחומרי שחזור שונים (מתכת, חרסינה, זירקוניה, ליתיום דיסיליקט ועוד), שמירה על חוזק הקישור לתקופה ארוכה, פולימריזציה בהקשיה כפולה (כימית + הקשיה באור), קישור חזק גם כאשר מדובר בהשחזה שאינה מיטבית, אי-ספיחת צבענים או שינוי צבע עם הזמן, יכולת התאמת גוונים קלה, סבילות ללחות והעדר צורך בבידוד השיניים המטופלות, הפרשת פלואוריד, יכולת טיפול מהיר, קל ופשוט במינימום שלבים. וכמובן - בעל תג מחיר סביר.

בפועל, הבעיה הניצבת בפנינו היא שלא קיים צמנט העונה על כל הדרישות. למרות השיפור הניכר בתכונותיהם של חומרי ההדבקה הדנטליים בשנים האחרונות, לכל אחד מהם קיימים יתרונות וחסרונות, הדורשים מרופא השיניים לקבל החלטה מושכלת באשר לסוג חומר השחזור ולסוג הדבק, בהתבסס על המידע הזמין.

ננסה לעשות סדר בתהליך קבלת ההחלטות: החלוקה הגסה היא בין גלאס יונמר לרזין, כאשר לכל אחד מהחומרים יתרונות וחסרונות.

צמנט גלאס יונמר או גלאס יונמר משופר ברזין: צמנטים דנטליים עם עשרות שנים של הצלחה קלינית. יתרונותיהם העיקריים הם (א) קיצור זמן העבודה, הודות לסבילות ללחות והיכולת להמנע מהצורך בבידוד קפדני של השן; (ב) הפרשת פלואוריד מתמשכת; (ג) תאימות ביולוגית המונעת רגישות דנטינלית בהדבקה על שיניים ויטליות ומצמצמת את הנזק במקרה של עודפי צמנט שלא סולקו; (ד) ללא צורך בצריבה וקישור, ועם קישור כימי לזירקוניה (בדורות האחרונים), המשפר את חוזק הקישור לשחזורים המבוססים על חומר זה.

מתי להשתמש בצמנט על בסיס גלאס יונמר?



מתי להשתמש בדבק על בסיס רזין?



המלצה:

הורידו את אפליקציית GC Luting Guide לסלולר, למדריך לבחירת הדבק המתאים ביותר למאפייני המקרה, ולהנחיות עבודה מפורטות לכל חומר:




G-CEM LinkAce™



דבק רזין + דבק GI:

מוכנים לכל מקרה
עם 2 הדבקים החיוניים
בכל מרפאה!

לשלוף את האס המנצח ברגע הנכון...

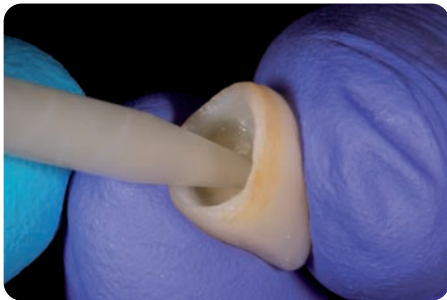

חדשנות • פשטות • רב-תכליתיות • אמינות

- הדבקה קבועה של כל סוגי הכתרים והגשרים
- לשחזורים עם מתכת או בלעדיה (חרסינה, זירקוניה, קומפוזיט)
- לכל סוגי המבנים והיתדות

האופציה המועדפת לכל צרכי השיקום

G-CEM LinkAce: הדור החדש של דבק על בסיס שרף בעל קישור עצמי, המתבסס על דורות קודמים ומוצלחים מבית GC, בתוספת פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים בתחום ההתקשות הכימית. **G-CEM LinkAce** הוא אסתטי, בעל תכונות פיזיקליות מתקדמות, מונע רגישות לאחר הטיפול ונוח לשימוש.

ב-595 ₪ בלבד!

במקום 760 ₪

ערכת 4 מזרקים
(שלושה מזרקים A2 + מזרק נוסף שקוף)



Images by Dr. Emmanuel D'Incau, France



Images by Dr. Frédéric Raux, France



FujiCEM 2



צמנט גלאס יונומר מחוזק ברזין.
חזק, עמיד ונוח לשימוש!

- להדבקת מגוון פתרונות שיקום: מבנים, חרסינה ע"ב מתכת (PFM), זירקוניה, קומפוזיט, Inlay, Onlay.
- נוחות שימוש מיטבית - סבילות ללחות, ללא צורך בצריבה וקישור.
- חסכוני, עם שליטה אוטומטית בערבוב, עם ערבוב ידני או כיות automix.



ב-750 ₪ בלבד!

במקום 1,200 ₪

מארז 4 שפופרות
FujiCEM2

FujiCEM Evolve

הדור הבא

צמנט הגלאס יונומר המוביל בעולם -
עכשיו חזק יותר, בהיר יותר ונוח יותר!

- צמנט גלאס יונומר מחוזק ברזין, סביל לתנאי רטיבות, עם הפרשת פלואוריד שנמשכת ונמשכת...
- חדש! כולל מזרק נוח לשימוש
- גוון בהיר יותר, לתוצאות אסתטיות יותר!
- חדש!! מזרק נוח לשימוש, עם צמיגות קלה לשליטה ואפשרות הקשיה קצרה באור (tack cure) להסרת עודפים
- זמין גם במזרקי Automix

ב-790 ₪ בלבד!

במקום 990 ₪

3 מזרקי FujiCEM Evolve
(לערבוב ידני)




בשנת 2017 חברת GC הרחיבה את טווח האפשרויות של **Essentia Universal**, והוסיפה שני מזרקים - של קומפוזיט נוזלי וקומפוזיט בהזרקה - כך שכיום הגוון האוניברסלי זמין ב-3 תצורות שונות, לנוחות רופא השיניים:

- **Paste**: שכופרת קומפוזיט משחתי, צמיג ודחיס, עם "אפקט הזיקית".
- **HiFlo**: מזרק קומפוזיט נוזלי (אבל חזק ועמיד!), המאפשר מילוי מעולה של חללים צרים או שחזורים עמוקים.
- **LoFlo**: מזרק קומפוזיט בהזרקה, לבנייה מדויקת וחזקה של קומפוזיט טיקסטרופי המאפשר עיצוב סגרי מדויק.

טכנולוגיית המילוי החדשנית של GC אפשרה גם למזרקי HiFlo ול-LoFlo להיות בעלי אחוז מילוי גבוה, כך שהם מספקים חוזק ועמידות לשחיקה שאינם נופלים מאלו של הקומפוזיט המשחתי, כפי שמוצג בגרף מס' 1.



Flexural strength & 3-body wear of the three viscosities of Essentia Universal shade (Source: GCC R&D data)

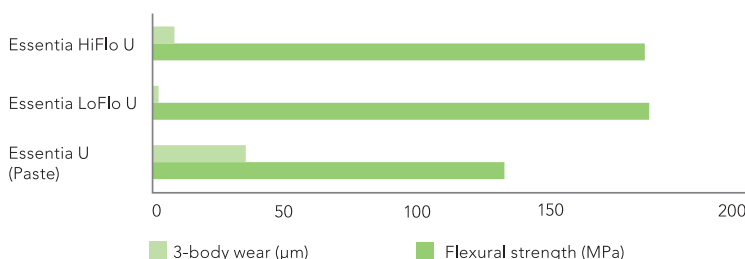

גרף מס' 1

מתחילת ימי "רפואת השיניים האדהזיבית", אשר במקביל אליה חלה עלייה בדרישה של מתרפאים לשחזורים אחוריים בעלי אסתטיקה גבוהה, רופאי שיניים ברחבי העולם מחפשים דרך קלה ויעילה לשחזר את המראה הטבעי ולהשיג אנטומיה מדויקת באזור הסגרי האחורי.

מבחר שיטות המשלבות גוונים שונים פותחו, בניסיון להשיג התמזגות טבעית של חומר השחזור עם סביבת השן הטבעית, תוך שימוש ב"סרגלי צבעים" שהפכו מסובכים עם השנים, שימוש בגוונים אטומים, גוונים שקופים ועוד. עם זאת, גישות רב-שכבתיות אלו הן מורכבות וכרוכות בעקומת למידה שאינה פשוטה לרופא השיניים, בין השאר משום שהן דורשות יכולת התאמת גוונים גבוהה ומחייבות זמינות במרפאה של מספר רב של שכופרות קומפוזיט במבחר גוונים.

שיטת **Essentia** המהפכנית, שהושקה ע"י חברת GC היפנית בשנת 2015, כללה מספר פיתוחים טכנולוגיים חדשניים, המאפשרים יצירה של "אפקט הזיקית", של שבירת אור ע"י חלקיקי המילוי, המאפשרת "שאיבת צבע" מרקמות השן הסובבות, כדי לספק לשחזור את גוון השן הטבעי. שיטה זו כוללת 7 שכופרות קומפוזיט בלבד: לשחזורים קדמיים הותאמו 5 שכופרות גוונים (3 גווני דנטין ו-2 גווני אמיל) המכסות את כל טווח השחזורים הקדמיים, בנוסף לצבע ממסך (Masking Liner) המאפשר איטום של כתמים על חומר השן.

השכופרת השביעית - Universal - נועדה לביצוע שחזורים אחוריים. כפי ששם החומר מייצג היטב, Essentia Universal הוא אוניברסלי, ובכך מספק פתרון מהפכני - התאמה אסתטית לכל מצב ולכל גוון שן - מ-B1 ועד C4, תוך שימוש בגוון אחד בלבד המתאים עצמו לשן. כך, **Essentia Universal** מספק יכולת התאמה מעולה לכל גוון של שחזור אחורי - בין אם Class I ובין אם Class II - בזכות "אפקט הזיקית".

מבנה החלקיקים של Essentia Universal מסתמך על חלקיקים ננומטריים - מקבצים של חלקיקי זכוכית (Strontium Glass, lanthanoid fluoride) בגדלי 100-400nm המקובצים לחלקיקים ועוברים פולימריזציה מראש, חלקיקי זכוכית (FAISi) בגודל 850nm, וחלקיקי סיליקה בגודל 16nm. הרכב החלקיקים והפיזור שלהם מעניק לקומפוזיט זה את תכונת החיכוך המדויק של צבע הרקמות הדנטליות הסובבות. עומק ההקשייה באור של החומר הוא 2.9 מ"מ. רמת הרדיו-אופאקיות שלו היא גבוהה (AI=252%), כדי להבטיח זיהוי קל בצילומי רנטגן.

כפי שניתן לראות בתמונה מס' 1, הפתרון האסתטי המושג ע"י **Essentia Universal** הוא מהפכני ביותר. שחזור של חללים בגוון A2, B1, C4-ו בוצע באמצעות אותו הגוון האוניברסלי, והניב תוצאה אסתטית מעולה.

המקרים הקליניים המוצגים בעמוד הבא מדגימים כיצד ניתן להשיג שחזור אחורי אסתטי בשיטה פשוטה ונוחה לשימוש.


Essentia® Universal shade

גוון אחד אוניברסלי מתאים לכל!



Essentia

קומפוזיט אוניברסלי מוקשה-אור
עם צמיגות דחיסה

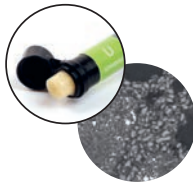

Essentia HiFlo

קומפוזיט אוניברסלי מוקשה-אור
עם זרימה גבוהה



Essentia LoFlo

קומפוזיט אוניברסלי מוקשה-אור
עם זרימה נמוכה



מבצע

3+1

קונים 3 מזרקים*
(לבחירה: Paste, Lo-Flo, Hi-Flo)

מחיר כולל:
₪ 540

ומקבלים מזרק נוסף
מתנה!

* כמות למזרק / שפופרת: 2 מ"ל

Pictures courtesy of Dr Bojidar Kafelov (Bulgaria)



מעקב לאחר 6 חודשים מציג התאמת צבעים
מצוינת לרקמות הסובבות



שחזור באמצעות everX Posterior כלבית
דנטין, ומעליו Essential Universal כמעטפת
החיצונית



גישה ישירה נבחרה למקרה מאתגר זה של
שחזור פוסט-אנדודונטי



Pictures courtesy of Prof Joseph Sabbagh (Lebanon)



תמונה לאחר הטיפול, המציגה התמזגות
מעולה עם חומר השן הטבעי



שחזור באמצעות
Essentia HiFlo Universal



הכנה של חללים סגריים קטנים (Class I)



תמונה לאחר הליטוש הסופי



שחזור באמצעות
Essentia LoFlo Universal



הכנת חללים לא-עשתיים באמצעות אבקה
בלחץ גבוה (air abrasion)



G-ænial

G-Premio BOND



3 שפופרות A2, A3, PA3
G-Premio Bond + גלגלי ליטוש Eve

ב-495 ₪ בלבד!

במקום 800 ₪

שילוב מנצח:

קומפוזיט משחתי מעולה,
וחומר קישור אוניברסלי מוביל,
בשילוב משתלם!



G-Premio BOND

- חומר קישור אוניברסלי עם או בלי צריבה.
- מאפשר טיפול מהיר, פשוט וניתן לחיזוי, בחוזק קישור גבוה וללא פשרות!
- משמש גם כבונדינג לתיקון שחזורים מודבקים שבורים מכל סוג.
- נועד גם למניעת רגישות צווארית.
- 300 טיפות לבקבוק



G-ænial

קומפוזיט קלאסי בעל "אפקט הזיקית" המאפשר התמזגות צבעים מושלמת עם האמייל והדנטין. רדיו-אופאקי, ידיות למשתמש עם צמיגות נוחה לעיצוב, יכולת ליטוש מעולה ושמירה על ברק וגוון לאורך זמן.



גלגלי ליטוש Eve

גלגלי הליטוש המובילים בעולם!
גלגלי גומי מתקדמים לליטוש, המאפשרים להגיע לרמת ברק אידיאלית של שחזורים מרוכבים באמצעות 2 גלגלים בלבד.



EQUIA Forte™ HT



גלאס ינומר חזק לשחזורים אחוריים,
עם הפרשת פלואוריד קבועה
ואסתטיקה משופרת.


- שקיפות משופרת של חומר השחזור, לתוצאה טבעית ואסתטית לאורך זמן
- פיזור חלקיקים מיטבי, לשיפור החוזק לשחזורים אחוריים קבועים Class I + Class II
- הנחה כ-Bulk, ללא רגישות ללחות!

פתרון מושלם להחלפת שחזורי אמלגם לקויים



באדיבות Dr. M. Basso, איטליה

שחזורים אחוריים קלים לביצוע במספר שלבים פשוטים - ללא צורך בבידוד מלא

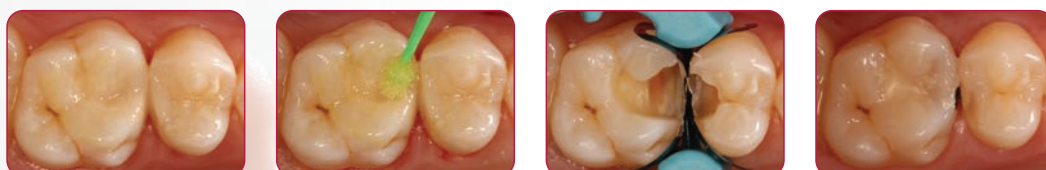

באדיבות Dr. Z. Bilge Kütük, טורקיה

שחזור של שיניים רגישות, עם תת-הסתיידות ו-MIH במתרכאים צעירים



באדיבות Dr. P. Rouas, צרפת

קונים Equia Forte HT
מארז 250 יח'

מחיר כולל:
₪ 1,860

ומקבלים 2 שפופרות G-aenial
(לבחירה קדמי או אחורי)
בגווי A2+A3 בשווי 300 ₪
מתנה!




CeraSmart™270 + OptiGLAZE



חורטים - צובעים - מדביקים!

בלוק CAD/CAM של חרסינה היברידית סופגת, זעזועים, בשילוב עם ערכת צביעה מתקדמת, לפתרון אסתטי ללא פשרות!

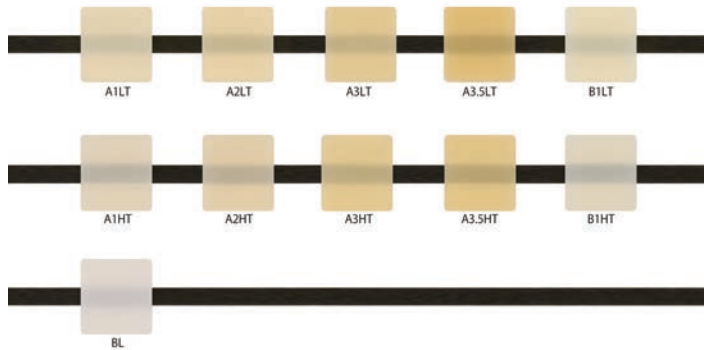

בלוקים חכמים לחריטה - שילוב של חוזק וגמישות!

- לשחזורים אסתטיים אופטימליים, עם גמישות המונעת נזק למשנן הנגדי וסופגת כוחות סגריים.
- התאמה מיטבית בחריטה, עם יכולת ליטוש גבוהה.
- חוזק לכפיפה 279MPa - חזק משמעותית מהמתחרים.
- ללא צורך בשריפה - חורטים, מוסיפים מאפיינים אסתטיים עם אופטיגלייז, ומדביקים!

במקום 1900 ₪ - 1500 ₪ בלבד!

ערכת CeraSmart270 עם OptiGLAZE
הכוללת 10 בלוקים, 5 בקבוקי צביעה, 1 בקבוק פריימר

*תכולה:

(3 x A2 HT; 3 x A3 HT; 2 x A2 LT; 2 x A3 LT) size 14;
Optiglaze Color A Plus, White, Red Brown, Clear,
Clear HV and G-Multi Primer



OptiGLAZE Color - הכל נראה יותר טוב בצבע!

- ציפוי מוקשה-אור לשחזורים היברידיים, מרוכבים ואקריליים, בטכנולוגיית ננו-מילוי המבטיחה שרידות וברק לאורך זמן.
- לתוצאה אסתטית עילאית ומתן אופי חי וטבעי לשחזורים.
- לטיפול ליד כסא המתרפא.



Courtesy of Dr. J. Tapia Guadix, Spain

Courtesy of Dr. Y. Roos, Spain

GC Ortho Connect™ Flow

דבק קיבועים אורתודונטי חזק ונוח לשימוש!

- דבק לקיבועים על בסיס רזין, הכולל את הפריימר והבונדינג (להנחה לאחר צריבה בלבד)
- קל ונוח להנחה, הדבקה והקשייה - אידיאלי להדבקת קיבועים לינגואליים
- גמישות ועמידות משופרות - שרשראות מונומר ארוכות יותר המגבירות את החוזק, הגמישות והעמידות לשחיקה, עם מונומר פוספטי המאפשר קישור גם לאמייל וגם למתכת
- יישום קל, ללא צורך בעיבוד וליטוש

מבצע


3+1

קונים 3 חב' GC Ortho Connect™ Flow

מתנה!

ומקבלים חב' נוספת

ניתן לשלב עם GC Ortho Connect™ המחיר למארז 2 מזרקים: 450 ש"ח

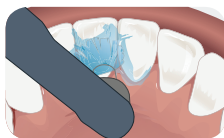


Clean and dry




Etch



Position retainer

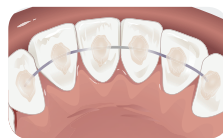

Apply Ortho Connect Flow

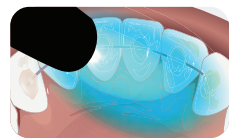

Light Cure

Initial™ LiSi Press

מטילי חריטה (Ingots)
בטכנולוגיית HDM
(High Density Micronization)



מבצע 1

קונים 5 חבילות LiSi Press Ingots
במחיר 330 ש"ח לחבילה

בשווי 350 ש"ח

ומקבלים במתנה
LiSi PressVest Intro Kit



לעשות באמת את המקסימום - חוזק ואסתטיקה ללא תחרות!

- ליתיום די-סיליקט עם חוזק לכפיפה ללא תחרות: 508MPa
- אסתטיקה טבעית בכל מצב, הודות לתכונות פלואורסנציה מצוינות
- התאמת שוליים מצויינת הודות לפיזור הומוגני של מיקרו-חלקיקים

קורסים

10.08.20

קורס למינייט בדחיסה לטכנאי שיניים



מר מוריס פרץ
מכשג אחד

הקורס יערך במרכז ההשתלמויות IDS רח' קויפמן 4 תל אביב
לפרטים והרשמה: 050-5357075

מבצע 2

קונים 10 חבילות LiSi Press Ingots
במחיר 330 ש"ח לחבילה

בשווי 950 ש"ח

ומקבלים במתנה
LiSi PressVest 6 ק"ג
+ נוזל



Labolight DUO

מכשיר להקשיה מהירה ויעילה באור
של שחזורים לא-ישירים,
למעבדה ולמרכאה.



- טווח רחב של אורכי גל, 380-510nm, לכל סוגי החומרים
- להקשיה שחזורים מרוכבים לא-ישירים (קבועים וזמניים),
- להקשיה מהירה של צבעי Optiglaze, ועוד!
- ארגונומי ונוח לתפעול

קונים Labolight DUO
במחיר 11,700 ₪

בשווי 3,000 ₪

ומקבלים זיכוי לרכישת
Gradia Plus
(גוונים לבחירה)

קורס



13.07.20
סדנת שחזורים מרוכבים מעבדתיים
לטכנאי שיניים

מר מוריס כרץ
מפגש אחד

הקורס יערך במרכז ההשתלמויות IDS רח' קויפמן 4 תל אביב
לפרטים והרשמה: 050-5357075



"מאה רופאים למאה שנים"

לאחר מאות רופאי שיניים ישראלים שהצטרפו למסע ליפן והוקסמו
מארץ השמש העולה - אתם מוזמנים להצטרף לחוויה, באירוע מיוחד
שיתקיים באפריל 2021!



ב-2021 חברת GC עומדת לחגוג 100 שנים
להיווסדה - מחברה קטנה בטוקיו, המייצרת
צמנטים דנטליים, לאחת החברות המובילות
בעולם החומרים והציוד הדנטלי.

לציון המאורע המיוחד, יתקיים ב-17-18.4.2021
סימפוזיון מדעי דנטלי בטוקיו, שיכלול הרצאות
בכל תחומי רפואת השיניים, לאלפי משתתפים
מכל העולם.

במסורת הנסיעות השנתיות ש-GC Israel
מארגנת ליפן כבר יותר מ-30 שנים, הפעם
החלטנו לארגן נציגות מכובדת של 100 רופאי
שיניים ישראלים, להשתתפות בכנס ולטיול
מרתק לנבכי התרבות היפנית, בסימן "מאה
רופאים למאה שנים".

מגוון נרחב של טיולים יוצע למשתתפים - החל
מטיול קבוצתי מאורגן לאלו שזה ביקורם הראשון
ביפן, המשך בסיוור מעמיק לאלו שכבר חוו את
יפן, התאהבו ורוצים להיחשף לחוויות חדשות,
ועד לחבילות טיול עצמאיות המשולבות עם
השתתפות בכנס. מועדי הטיולים יתקיימו לפני
ואחרי הכנס, לנוחות המשתתפים.

לפרטים:

03-7979604 (אוריה)

Oriyah.engler@gc.dental

לאספו את רופאי הפליינים לשנסו!





קורס בקופסה קורס מעשי - אצלך במרפאה!

קורס בקופסה:

- ☒ וובינר בלימוד מרחוק הכולל תרגול מעשי
- ☒ שידור חי עם תמיכה מלאה של המרצה ומענה לשאלות המשתתפים במהלך התרגול המעשי
- ☒ קיט מתקדם הכולל מודל ייעודי לתרגול וערכת חומרים מותאמים
- ☒ חומרי התרגול נשארים בידך, לשימוש מעשי על מתרפאים מיד לאחר הקורס
- ☒ לא צריך לבטל משמרת עבודה



קורס בקופסה מס' 1:

הרמת מנשך אחורי בהזרקה לתבנית / ד"ר הנרי רון

המומחה לשיקום הפה ד"ר הנרי רון ירצה על הטיפול במשנן השחוק והרמת מנשך אחורי, כולל הדגמה. תרגול הרמת מנשך אחורי באמצעות הזרקה לתבנית יבוצע באמצעות קיט "קורס בקופסה", המכיל מודל ייעודי, חומר מטבע שקוף Exaclear, 3 מזרקי G-aenial Universal Injectable, מקדחים, מברשות ליטוש ועוד.



מועדים קרובים: 13/7/20, 27/7/20

מועדים נוספים יפורסמו בהמשך.

ניתן להתעדכן באתר www.ids4u.co.il
פרטים נוספים בטל. 03-7979600

בקרב יוצעו ערכות נוספות של "קורס בקופסה":

- ציפוי קומפוזיט קדמיים / מר מוריס פרץ
 - גשרים אדהזיביים / ד"ר משה פלייטמן
- התעדכנו באתר IDS לפרטים נוספים!**



מידעון קורסים

יולי - ספטמבר 2020

מרכז ההשתלמויות ברפואת שיניים IDS שמח לעדכן אתכם במועדי פתיחת הקורסים הקרובים:

חזיתיות חרסינה - עבודת צוות (כולל טיפול במתרכא)
ד"ר מ. פלייטמן, מר מ. פרץ
03.08.20 - 3 מפגשים

סדנת למינייט בדחיסה / לטכנאי שיניים
מר מ. פרץ
10.08.20 - מפגש אחד

קורס מקיף ברפואת שיניים לילדים
ד"ר א. זילברמן, ד"ר מ. סולומונוב, ד"ר ג. בן יצחק, ד"ר י. שפינקו
13.08.20 - 6 מפגשים

אורתודונטיה טרום שיקומית
ד"ר י. מזור
17.08.20 - 2 מפגשים

היבטים אורתודונטיים בעבודת רופא השיניים לילדים
ד"ר י. שפינקו
17.08.20 - מפגש אחד

האנדודונטיה של העתיד
ד"ר מ. סולומונוב, ד"ר א. עמית
19.08.20 - מפגש אחד

סדנת שורשים באנדודונטיה
ד"ר ג. בן יצחק
25.08.20 - מפגש אחד

טיפול שורש בשיניים קבועות צעירות עם אפקס כתוח
ד"ר מ. סולומונוב, ד"ר ג. בן יצחק
26.08.20 - מפגש אחד

שחזורים אסתטיים ישירים ובלתי ישירים
ד"ר ג. טלמור
03.09.20 - 2 מפגשים

קורס מקיף ברפואת שיניים אסתטית
ד"ר מ. פלייטמן, ד"ר כ. חארוף
15.09.20 - 8 מפגשים

"מאה טיפים ועוד" ברפואת שיניים משקמת
ד"ר א. גלבוע
01.07.20 - 2 מפגשים

שתלים למתחילים (תרגול על ראשי גוויות)
פרופ' א. רביב (קנדה)
02.07.20 - 3 מפגשים

קורס מקיף באנדודונטיה
ד"ר מ. סולומונוב
08.07.20 - 7 מפגשים

סדנת שחזורי רזין מעבדתיים / לטכנאי שיניים
מר מ. פרץ
13.07.20 - מפגש אחד

שימוש יום יומי ב-CBCT
ד"ר מ. סולומונוב, ד"ר ג. בן יצחק, ד"ר א. לוינזון
15.07.20 - מפגש אחד

הרמות סינוס וכל סוגי האוגמנטציה (תרגול על ראשי גוויות)
פרופ' א. רביב (קנדה), ד"ר מ. רביב
16.07.20 - 3 מפגשים

שיקום על גבי שתלים
ד"ר ב. כרמון
19.07.20 - 4 מפגשים

אסתטיקה של הפנים (תרגול על ראשי גוויות)
פרופ' א. רביב (קנדה), ד"ר מ. רביב, ד"ר מ. אלמן
23.07.20 - 3 מפגשים

פריו-כירורגיה באמצעות הלייזר הדנטלי
ד"ר ד"ר מ. יונס, ד"ר א. סביון
27.07.20 - מפגש אחד

כתרים והשחזות בעידן המודרני
ד"ר מ. פלייטמן, ד"ר ב. פלייטמן, ר. אוליאד
28.07.20 - 6 מפגשים

תותבות שלמות - קורס קליני
ד"ר א. גלבוע
29.07.20 - 6 מפגשים

לפרטים נוספים ולהרשמה: 03-7979600/3

מידע מכורט באתר האינטרנט החדש שלנו: www.ids4u.co.il

4 Koifman st. Tel Aviv 68012 Tel: 972-3-7979600, Fax: 972-3-5161547 ids@ids4u.co.il