

# COVID-19 ٹیسٹ کیسے کیا جائے

QuickVue At-Home OTC COVID-19 ٹیسٹ کا استعمال

## کے بارے میں

یہ QuickVue At-Home OTC COVID-19 ٹیسٹ کٹ کے حوالے سے ایک آسان رہنمائی ہے۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے، براہ کرم کٹ میں موجود ہدایاتی شیٹ اور مریض کے حقائق کی شیٹ سے رجوع کریں۔ اس مصنوعہ کو 'FDA ایمرجنسی استعمال کی توثیق' حاصل ہے۔



ویڈیو میں ٹیسٹ کے طریقہ کار کے حوالے سے جاننے کے لیے،  
[quickvueathome.com/#video\\_testkit-2](https://quickvueathome.com/#video_testkit-2) پر جائیں

پہلے سے بھری ہوئی ٹیسٹ ٹیوبز

فوم کے سوابس

یہاں سے کھولیں

**کٹ میں کیا موجود ہوتا ہے؟**

- پہلے سے بھری ہوئی ٹیوبز
- ٹیوب ہولڈرز
- فوم کے سوابس
- ٹیسٹ اسٹریپس
- ہدایاتی شیٹ
- مریض کے حقائق کی شیٹ

ٹیسٹ ٹیوب ہولڈرز

ٹیسٹ اسٹریپس

یہاں سے بکڑیں

**آپ کو مزید کیا درکار ہے؟**

گھڑی یا ٹائممر (شامل کردہ نہیں)  
 اس ٹیسٹ کے لیے  
 وقت کی باہندی کرنا نہایت اہم ہے!


## ٹیسٹ شروع کرنے کے لیے

اپنے ہاتھ دھوئیں اور کٹ کو ہموار اور صاف سطح پر رکھیں۔ کمرے میں اچھی روشنی کی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ اگر آپ کسی دوسرے شخص کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اپنے چہرے پر ماسک پہنیں۔ کٹ کھولیں اور درج بالا تمام آئٹمز کی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ اپنا ٹائممر یا گھڑی لیں اور دوسری طرف مرحلہ وار ہدایات پر عمل کریں۔

# ٹیسٹ کرتے ہوئے

1

ٹیوبز میں سے ایک ٹیوب کا ڈھکن اتاریں اور اسے ٹیوب ہولڈر میں ڈالیں۔

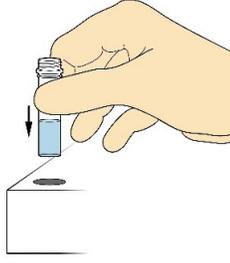

سواب کے اوپر والے حصے کو مت چھوئیں





2

سواب کا ریپر کھول کر اتار لیں۔ سواب کے اوپر والے حصے کو مت چھوئیں۔

3

سواب کو تقریباً 1/2 سے 3/4 انچ تک ایک نتھنے کے اندر ڈالیں اور کم از کم 4 مرتبہ اسے اندر کی سطح سے مس کریں۔ اسی سواب کا استعمال کرتے ہوئے، دوسرے نتھنے میں اس عمل کو دہرائیں۔ یہ عمل انجام دیتے ہوئے تقریباً 15 منٹ لگیں گے۔

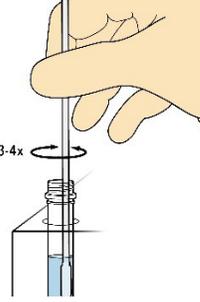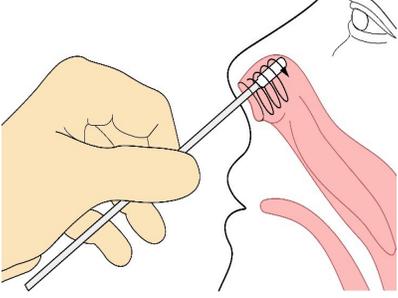


4

ناک میں سے ٹیسٹ کے لیے نمونہ حاصل کرتے ہی، سواب کو کھلی ٹیوب میں ڈالیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سواب ٹیوب کی نچلی سطح کو چھو رہا ہے۔ 3 سے 4 مرتبہ سواب کو بلائیں۔

5


سواب کو کم از کم 1 منٹ کے لیے ٹیوب میں چھوڑ دیں۔ (ٹائمر یا گھڑی کا استعمال کریں!) اگر آپ سواب کو زیادہ مختصر یا زیادہ طویل وقت کے لیے ڈالے رکھتے ہیں تو غلط نتائج نکل سکتے ہیں۔

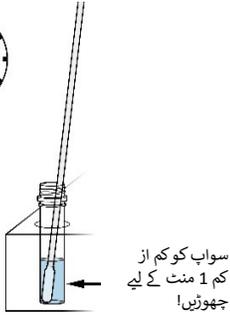

سواب کو کم از کم 1 منٹ کے لیے چھوڑیں!

6

1 منٹ کے بعد، سواب کو ٹیوب سے باہر نکالیں، سواب کے اوپر والے حصے کو ٹیوب کی اندرونی سطح کے رگڑیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مائع باہر نکل سکے۔ سواب کو پھینک دیں۔

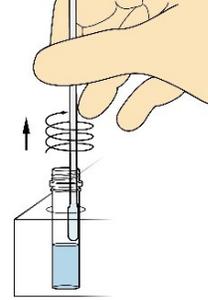


7

احتیاط سے ٹیسٹ اسٹریپ کی تھیلی کھولیں اور تیروں کے نشان کو نیچے کی جانب کرتے ہوئے ٹیسٹ اسٹریپ کو کھلی ٹیوب میں ڈالیں۔ اسٹریپ کو 10 منٹ کے لیے ٹیوب میں چھوڑ دیں۔ (ٹائمر یا گھڑی کا استعمال کریں!)



اسٹریپ کو 10 منٹ کے لیے ٹیوب میں چھوڑیں

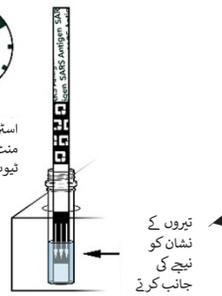


تیروں کے نشان کو نیچے کی جانب کرتے ہوئے

8

10 منٹ کے بعد، ٹیسٹ اسٹریپ کو ٹیوب سے باہر نکالیں اور اسے اچھی روشنی والی ہموار سطح پر رکھیں۔ فوراً ٹیسٹ اسٹریپ کو پڑھیں! اگر آپ اسے پڑھنے میں 5 منٹ سے زیادہ انتظار کرتے ہیں، تو آپ کو غلط نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔

## اپنے ٹیسٹ کے نتائج کے بارے میں پڑھیں

ٹیسٹ کے ممکنہ طور پر 3 قسم کے نتائج ہوتے ہیں: مثبت، منفی یا غلط، وہ ٹیسٹ جو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

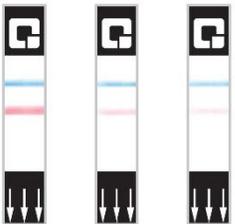

مثبت نتیجہ = 1 گلابی لائن + 1 نیلی لائن  
آپ کو COVID-19 ہونے کا امکان موجود ہے۔ آپ کو ذاتی علیحدگی اختیار کرنی چاہیئے۔ اگر آپ میں علامات موجود ہیں جو آپ کو تنگ یا پریشان کر رہی ہیں، تو اپنے نگہداشت صحت کے فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔



منفی نتیجہ = 1 نیلی لائن  
آپ کو COVID-19 ہونے کا امکان موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ میں کوئی علامات موجود ہیں جو آپ کو تنگ یا پریشان کر رہی ہیں، تو اپنے نگہداشت صحت کے فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔



غلط نتیجہ = 1 گلابی یا کوئی لائنز موجود نہیں  
آپ کو نیا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نئی ٹیوب، سواب، اور ٹیسٹ اسٹریپ کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے آغاز کریں۔ 2 غلط نتائج حاصل ہونے پر، -1-833-784-2588 کو کال کریں۔